

Dermicus mobilapp på Android – installation

Skapa ett Google konto med hjälp av Google Play på er mobil.

Ni skall skapa ett Google-konto per vårdcentral, om ni inte redan har ett sådant. Det skall inte vara ert personliga Google-ID och koordinera gärna med er lokala centeradmin för Dermicus.

1. Starta mobilen, och säkerställ att det finns internetuppkoppling.
2. Kom åt Dermicus mobilappen genom Google Play genom att välja ett av alternativen nedan:
 - a. Sök på “Dermicus” på Google Play. Välj “Dermicus” från listan.
 - b. Skanna QR koden för att komma direkt till mobilappen.



- c. Klicka på länken för att komma fram till nedladdningssidan [Dermicus](#)
3. Se bild nedan för Dermicus mobilapp. Klicka på “Installera”.
4. Gå tillbaka till hemskärmen på mobiltelefon.
5. Vänta på att den nya appen (Dermicus) laddas ner och installeras.
6. Klicka på Dermicus appen och klicka ”OK” för Dermicus begär åtkomst till kamera.

7. Installationen är nu klar och du kan börja använda Dermicus appen.
8. Första gången man går in i Dermicus appen skall man välja Server välj den som heter EU