

Instruktion till Blodinfo/InterInfo

Återrapporering vid transfusionskomplikation

Återrapporera genast den blodenhets som misstänkts ha gett upphov till transfusionskomplikationen. När en enhet har rapporterats med reaktion upphör BAS-testens giltighet och MG-test måste göras, detta för patientens säkerhet.

Tänk på att alltid fylla i blanketten ”Rapport vid transfusionskomplikation” och följ instruktioner.

Välj den aktuella blodpåsen under reservation. Blodenhetsens tappningsnummer och komponentkod fylls i. Kontrollera att rätt
Fyll därefter i aktuell reaktion
Tryck registrera.

Transfusion | **Transfusion med reaktion** | **Kassation**


Blodenhets **Del 1** S0011 10 006609 W
Del 2 E3846000

Transfusionsdatum/tid 100722 1356

Reaktion

<input type="checkbox"/> Andningsbesvär	<input type="checkbox"/> Anafylaktisk chock
<input type="checkbox"/> Arytmi, pulsstegring	<input type="checkbox"/> Blodtrycksfall
<input type="checkbox"/> Blodtrycksstegring	<input type="checkbox"/> Cyanos
<input type="checkbox"/> Temp.stegring	<input type="checkbox"/> Frysningar
<input type="checkbox"/> Hudrodnad	<input type="checkbox"/> Hämoglobinuri, ikterus
<input type="checkbox"/> Illamående, kräkningar, yrsel	<input type="checkbox"/> Petechier
<input type="checkbox"/> Quincke ödem	<input type="checkbox"/> Lumbal smärta
<input type="checkbox"/> Tryckkänsla över bröstet	<input type="checkbox"/> Urticaria

Övrigt

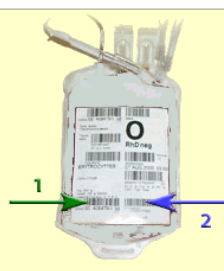

Reservationer

Ordernr	Reserverad	Mottagande avdelning	Res. omgång	Komponent	Antal
	10-07-22 13:51	3 BLODCENTRALEN KARLSKRONA	3	Erythrocyter	1
Blodenhets(er) S0011 10 006609 W E3846000 Utlämnad 10-07-22 13:51					

**Laboratoriet ansvarar inte för utskrivna kopior.
Giltig version finns alltid på nätet.**

Instruktion till Blodinfo/InterInfo

Fördröjd transfusionskomplikation/Redan rapporterad komponent

Har blodkomponenten transfusionsrapporterats och det sker en transfusionskomplikation under eller efter transfusion, rapporteras transfusionskomplikationen under fliken historik. Tryck därefter ”Rapportera transfusionsreaktion”.



The screenshot shows the InterInfo web interface. At the top, the patient ID is 19 010101-0101 and the patient name is TESTMAN, TEST. The user is logged in as bij@blc. There are three tabs: Patientinformation, Historik, and Rapportera. The Historik tab is selected. Below the tabs, there is a section for Transfusionshistorik with checkboxes for Erythrocyter, Trombocyter, and Plasma, and a 'Visa' button. A table shows a transfusion record for 10-07-22 13:57. Below the table, there is a button labeled 'Rapportera transfusionsreaktion' which is circled in red. At the bottom, there is a 'Logga ut' button and a logo for ProSang by Databyrån.

Patientid:
19 010101-0101
TESTMAN, TEST

Inloggad som:
bij@blc

Patientinformation Historik Rapportera

Transfusionshistorik

Erythrocyter Trombocyter Plasma
som använts senaste 99 veckorna Visa

Datum tid	Komponent	Identitet	Förenlighetsprövning	Använd till	Volym	Ack. volym
10-07-22 13:57	Erythrocyter	S0011 10 006609	E3846000	Akututlämning.	Transfunderad	

Rapportera transfusionsreaktion

Reservationer

Ordernr	Reserverad	Mottagande avdelning	Komponent	Antal
---------	------------	----------------------	-----------	-------

< Ny patient Logga ut >

Part of ProSang by Databyrån

Laboratoriet ansvarar inte för utskrivna kopior.
Giltig version finns alltid på nätet.