

## Packinstruktion till externa kunder

---

### Packinstruktion till externa kunder

Så här ska proverna hanteras



- Placera en plastpåse, avsedd för detta ändamål, i lådan.
- Lägg lämpligt antal absorberingsdukar i botten på påsen. En absorberingsduk kan suga upp 150 ml.
- Sätt rör som skall vara i rumstemperatur, till exempel PK-prov, i en rumstempererad gul insats. Vintertid när det kan vara kallt i bilen är det bra att lägga en rumstempererad gelpåse ovanpå PK-rören så att de inte riskerar att bli för kalla.
- Sätt rör som tål kyla i en kyld gul insats och lägg en kyld gelpåse ovanpå.  
OBS! Lägg inte den kalla gelpåsen på den allra högsta insatsen så den riskerar att falla ned på de rumstempererade rören.
- Placera de gula insatserna med provrör i lådan och förslut plastpåsen med en påsklämma.
- Lägg remisserna i en plastficka ovanpå påsen och sätt på locket.
- Frysta prover kan packas i samma väska som övriga prover om det finns plats.  
Sätt ner de frysta provrören i en grön frysburk, lägg en absorberingsrondell ovanpå och sätt på locket. Placera frysburkarna i avsedda gula insatser och sätt ner i väskan.

**Se till att inte placera den frysta insatsen bredvid en rumstempererad!**